



Septicare®

SEPTICARE II BOND EXPRESS



MONODOSE



NOTICE D'UTILISATION
Use instruction
Bedienungsanleitung

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Material needed - Benötigtes Material

Précaution d'usage : veuillez porter les gants pour chaque utilisation. Monodose à usage unique. 1 seringue = 1 onglon.

Usage precaution : Please, wear gloves. Single use syringe. 1 syringe = 1 hoof.

Rat : Bitte tragen Sie Handschuhe. Einwegspritze.



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Use precautions - Vorsichtsmaßnahmen



- 1 La colle doit être à minimum 0°C pour pouvoir être appliquée.
The bond has to be at minimum 0°C to use it.
Der Kleber muss eine Mindesttemperatur von 0°C haben, um benutzt zu werden.
- 2 Si elle a une température inférieure : la laisser à température ambiante pendant 24 h avant utilisation.
If it has a lower temperature: let it at room temperature during 24h before use.
Wenn er kälter ist: Bewahren Sie den Kleber 24 Stunden vor Benutzung bei Raumtemperatur auf.
- 3 Si elle a atteint une température inférieure à -15°C, la colle n'est PLUS utilisable.
If it has been lower than -15°C, the bond can't be reused.
Wenn der Kleber kälter als -15°C war, kann er nicht mehr verwendet werden.


COMMENT APPLIQUER LE PRODUIT ?

How to apply the glue? - Wie Sie den Kleber auftragen ?




1 Bien nettoyer et préparer le sabot.
Clean and prepare the claw.

Bereiten Sie die Klaue vor, in dem Sie sie Säubern und Schleifen.

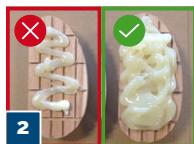

2 Appliquer la colle sur la semelle, attendre 2 secondes, puis poser la semelle sur l'onglon.
Apply the bond on to the block, wait 2 seconds then put the block on the hoof.

Tragen Sie den Kleber auf den Block, warten Sie ca. 2 Sekunden, bevor Sie Block und Klaue zusammenführen, damit der Kleber reagieren kann.

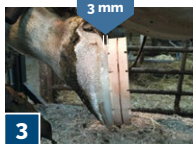

3 Assurez-vous qu'il y ait une épaisseur de 3 mm de colle entre la semelle et le sabot.
Be sure the thickness between the bond and the claw is equal to 3mm.

Stellen Sie sicher, dass genug Kleber aufgetragen ist, ca. 3 mm dick.



4 Vous pouvez ajuster et manipuler la semelle pendant quelques secondes pour que la pose soit optimale. Au bout de 30 secondes, la semelle est figée.
You can adjust and handle the block during a few seconds for an optimal putting. After 30 seconds, the block is fixed.
Der Block kann ca. einige Sekunden lang an die richtige Position geschoben werden, danach sollte er 30 Sekunden trocknen.



5 Après 3 minutes, l'animal et peut-être relâché.
After 3 minutes the cow can be released.
Nach 3 Minuten ist der Kleber komplett fest und die Kuh kann laufen gelassen werden.

DISTRIBUÉ PAR



UKAL
Le monde de l'élevage

www.ukal-elevage.com

Une commande, une question ?

Contactez-nous au 03 88 07 40 15
ou par email : ukalel@ukal-elevage.com

